

Vážení rodiče,
předkládáme Vám, s předstihem
k prostudování příbalový leták testu,
který se bude používat k testování
každé pondělí a čtvrtek
v naší Mateřské škole.


Tyto testy zajišťovala MŠMT.

Souprava pro testování antigenu 2019-nCoV

(Imunochromatografie z koloidního zlata)

NOVÁ STUDIE

Senzitivita 95,06 % (až 98,54 % při CtQ5)
Specifická 99,62%

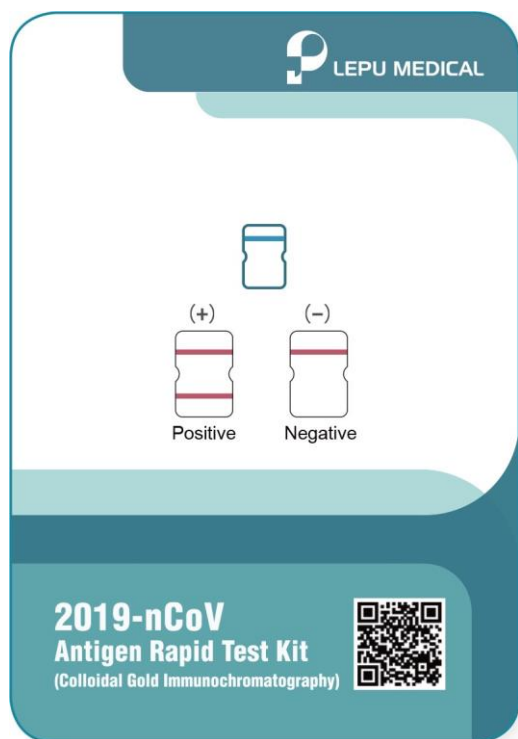

- O Šetrný výtěr z přední části nosu
- O Neinvazivní
- O Jednoduché použití
- O Praktický, není potřeba přístroj
- O Rychlý, výsledek za 15 minut
- O Stabilní, s vysokou přesností

- O Testy splňují všechny podmínky, které ZP požaduje

Souprava je určena ke kvalitativní detekci antigenu 2019-nCoV v klinickém vzorku. Testovací kazeta je založena na specifické reakci protilátka-antigen a technologii imunoanalýzy.

WHO doporučuje imunotesty k detekci antigenu v diagnostice infekce 2019-nCoV.

Vzorek	Výsledek	Balení
šetrný neinvazivní výtěr z nosu	do 15 min.	25 ks



Nemocnice



Odběrová
místa



Letiště



Doprava



Hotel




Společnosti




Hromadný
screening

Návod k použití

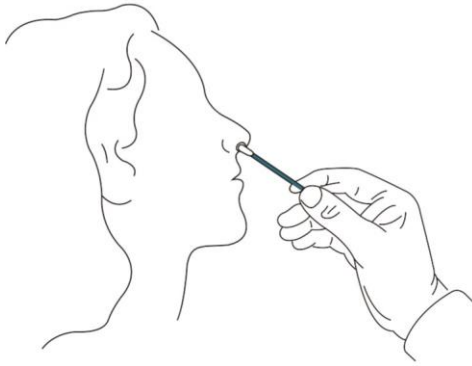


Krok 1: Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky

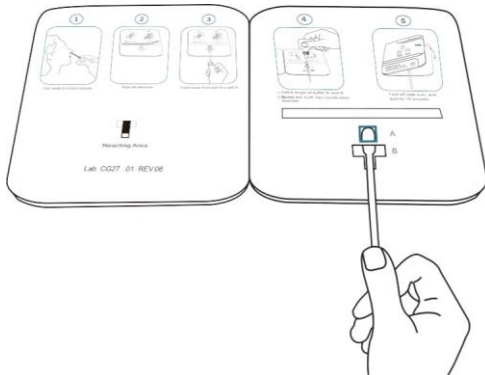


Krok 3: Tyčinku dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.

Interpretace výsledku


Pozitivní

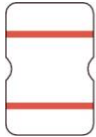



Negativní

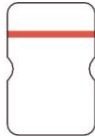

Neplatný

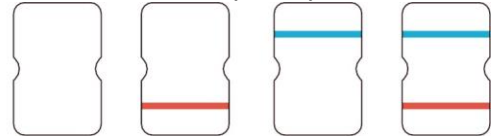

Krok 2: Protáhněte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

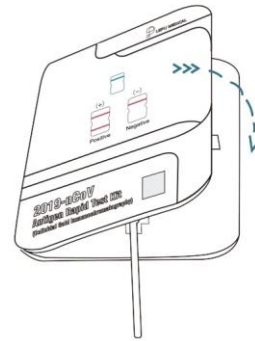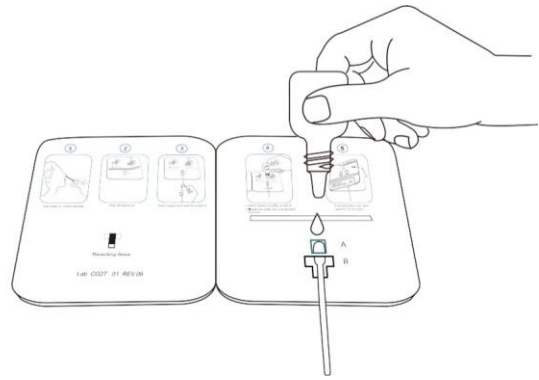

Krok 4: Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Slepěte levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.

Poznámky
